

FRAGEN UND ANTWORTEN :

1. F. Wie funktioniert der GEHE BALANCE SCHWANGERSCHAFTS-FRÜHTEST?

A. Kurz nach der Beirichtung bildet die Placenta das Schwangerschaftshormon hCG und gibt es kontinuierlich in den Urin ab. Dieses Hormon steigt bis zum 3. Schwangerschaftsmonat an. Der GEHE BALANCE SCHWANGERSCHAFTS-FRÜHTEST erkennt bereits sehr geringe Konzentrationen dieses Hormons und weist sie schon in sehr frühen Stadien der Schwangerschaft im Urin nach.

2. F. Ab wann kann der Test angewendet werden?

A. Im Vergleich zu herkömmlichen Schwangerschaftstests ist der GEHE BALANCE SCHWANGERSCHAFTS-FRÜHTEST mit einer unteren Nachweisgrenze ab 10 IE/L ein sehr sensibler Frühtest. Falls eine Anwendung bis zu 4 Tagen vor der fälligen Periode gewünscht wird, sollte der erste Morgenurin verwendet werden. Empfohlen wird die Anwendung ab der fälligen Periode, hierbei kann der Test auch zu jeder Tageszeit durchgeführt werden.

3. F. Kann Alkohol das Testergebnis beeinflussen?

A. Nein, wenn der Konsum nicht übermäßig ist.

4. F. Können Medikamente das Testergebnis beeinflussen?

A. Hormon beinhaltende Medikamente ja, die Pille nicht.

GRENZEN :

- Ein sehr leicht positives Ergebnis, dass erst nach 10 Minuten erscheint, ist nicht mehr sicher auszuwerten.
- Durch die hohe Empfindlichkeit des Tests werden schon sehr niedrige hCG-Werte während den ersten Tagen der Schwangerschaft nachgewiesen. Gerade in frühen Anfangsstadien werden 31 % aller Schwangerschaften natürlich abgebrochen (spontaner Abort), 22 % bleiben klinisch unerkannt.
- Außer Schwangerschaften können auch andere Gründe wie z.B. Krankheiten oder spontane Aborts nachweisbare hCG-Werte im Urin bewirken.
- hCG, FSH, LH und TSH beinhaltende Medikamente beeinflussen das Testergebnis.
- Urin der Wechseljahre kann ebenfalls falsch positive Ergebnisse verursachen.

WARNHINWEISE :



- Gebrauchsanweisung vor der Anwendung sorgfältig durchlesen!
- Von Kindern fernhalten, nicht einnehmen!
- Teststab nicht auseinandernehmen!
- Gebrauchten Test umgehend nach der Anwendung entsorgen!
- Test nicht anwenden, wenn die Folie beschädigt oder das aufgedruckte Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist!

PRODUKTINFORMATIONEN :

PRODUKTNAME/CODE: GEHE BALANCE SCHWANGERSCHAFTS-FRÜHTEST / GB-322

HERSTELLER: LaVita GmbH, Alt Praunheim 46D, D-60488 Frankfurt/Main, www.LaVita-e.com

VERWENDUNGSZWECK: Schwangerschaftstest zur Eigenanwendung im menschlichen Urin

PACKUNGSBESTANDTEILE: 1 Test, 1 Anwendungshinweis.

AUFBEWAHRUNG: Bei Raumtemperatur (2° bis 30°C). Nach Öffnen des Folienbeutels ist der Test 1 Stunde haltbar.

LEISTUNGSMERKMALE: Sensitivität : ab 10 IE/L

Gesamtgenauigkeit : über 99 % (75 positiv und 25 negativ erkannte Ergebnisse von 100 Urinproben). Der Test wurde mit dem 3. Internationalen Standard der WHO standardisiert und zeigt keine Kreuzreaktion bei Zugabe von LH (300 mIE/ml), FSH (1.000 mIE/ml) und TSH (1.000 IE/ml) zu negativen (0 mIE/ml hCG) und positiven (25 mIE/ml hCG) Proben.

WIRKSAME BESTANDTEILE: Monoklonale Antikörper gegen hCG.



DRUCKDATUM DER GEBRAUCHSANWEISUNG: 01.09.2006 (Rev.0) © LaVita

GEHE

BALANCE

SCHWANGERSCHAFTS-FRÜHTEST Gebrauchsanweisung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein GEHE BALANCE Produkt entschieden haben! Vor Anwendung des Tests bitte erst alle Hinweise sowie die "Fragen und Antworten" auf der Rückseite sorgfältig durchlesen.



ANWENDUNG

- 1 Folienbeutel erst kurz vor der Anwendung aufreißen und Teststab entnehmen.
- 2 Schutzkappe abziehen, untere Testspitze für 10 Sekunden in den Urin halten.
- 3 Schutzkappe aus hygienischen Gründen wieder auf die Testspitze aufsetzen und 3 Minuten warten.


FEHLERQUELLEN

Das tiefere Eintauchen des Teststabes über die Testspitze (z. B. im Becher) kann Fehlfunktionen des Tests verursachen.

ERGEBNIS ABLESEN

Lesen Sie das Ergebnis nach 3 Minuten ab. Je nach hCG-Konzentration kann ein positives Ergebnis schon nach 1 Minute erscheinen. Bei dem Ergebnis "Schwanger" können die 2 Linien von unterschiedlicher Stärke und Farbtintensität sein. Bedingt durch niedrige hCG-Werte gerade zu Beginn einer Schwangerschaft kann die Linie im eckigen Fenster nur sehr leicht gefärbt oder auch nur sehr dünn sein.

Hinweis: Falls nach 3 Minuten keine farbige Linie erscheint, warten Sie noch 1 Minute länger. Nach 10 Minuten kann das Ergebnis nicht mehr sicher ausgewertet werden.

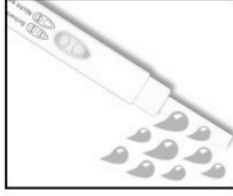

Eine Linie:
Sie können davon ausgehen, "nicht schwanger" zu sein.



Zwei Linien:
Sie können davon ausgehen "schwanger" zu sein.



Keine Linie (völlig weißes Ergebnisfenster), bedeutet Testergebnis "UNGÜLTIG".

FOLGEMASSNAHMEN

Testergebnis "NICHT SCHWANGER"

Ist das Testergebnis "NICHT SCHWANGER" und die Periode überfällig, führen Sie bitte am nächsten Tag einen neuen Test durch und wenden sich an Ihren Frauenarzt (vermeiden Sie potentielle Risiken des Embryos wie z.B. Röntgen).

Testergebnis "SCHWANGER"

Bitte wenden Sie sich gleich an Ihren Frauenarzt, er wird Sie für den weiteren Verlauf der Schwangerschaft beraten (vermeiden Sie potentielle Risiken des Embryos wie z.B. Röntgen).

Testergebnis "UNGÜLTIG"

Bei einem ungültigen Testergebnis wurde sehr wahrscheinlich nicht genügend Urin aufgenommen. Bitte wiederholen Sie die Anwendung mit einem neuen Test.

Haben Sie mehrere Tests durchgeführt und verschiedene Ergebnisse erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren Frauenarzt.